

S

**Optima**  
mascarilla | face mask  
**COVID-19**

**sense**



GUÍA DE PRODUCTO





MADE IN SPAIN

## Descripción

Las mascarillas autofiltrantes *Optima Sense* ofrecen protección respiratoria efectiva frente al COVID-19.

- Plegable y fácil de almacenar, con un diseño compacto.
- Material filtrante de nanofibras que proporciona una protección total con baja resistencia a la respiración para un rendimiento constante de alta calidad.
- Clip nasal que se ajusta a la nariz y el contorno de la cara.
- Empaquetado higiénico que protege a las mascarillas de la contaminación antes de su uso.
- Adaptadores de presión en las bandas de ajuste que mejoran el confort en la nuca, cara y cabeza aumentando la sensación de seguridad.
- 2 Bandas de ajuste y sujeción.

## Normativa


Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001+A1:2009 modificada por RfU PPE-R/02.075 versión 2 por AITEX (La Asociación de Investigación de la Industria Textil)

Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva Europea por lo que tienen marcado CE.

ANDEFIL cuenta con certificado ISO 9001 y certificado ISO 14001.



# Componentes

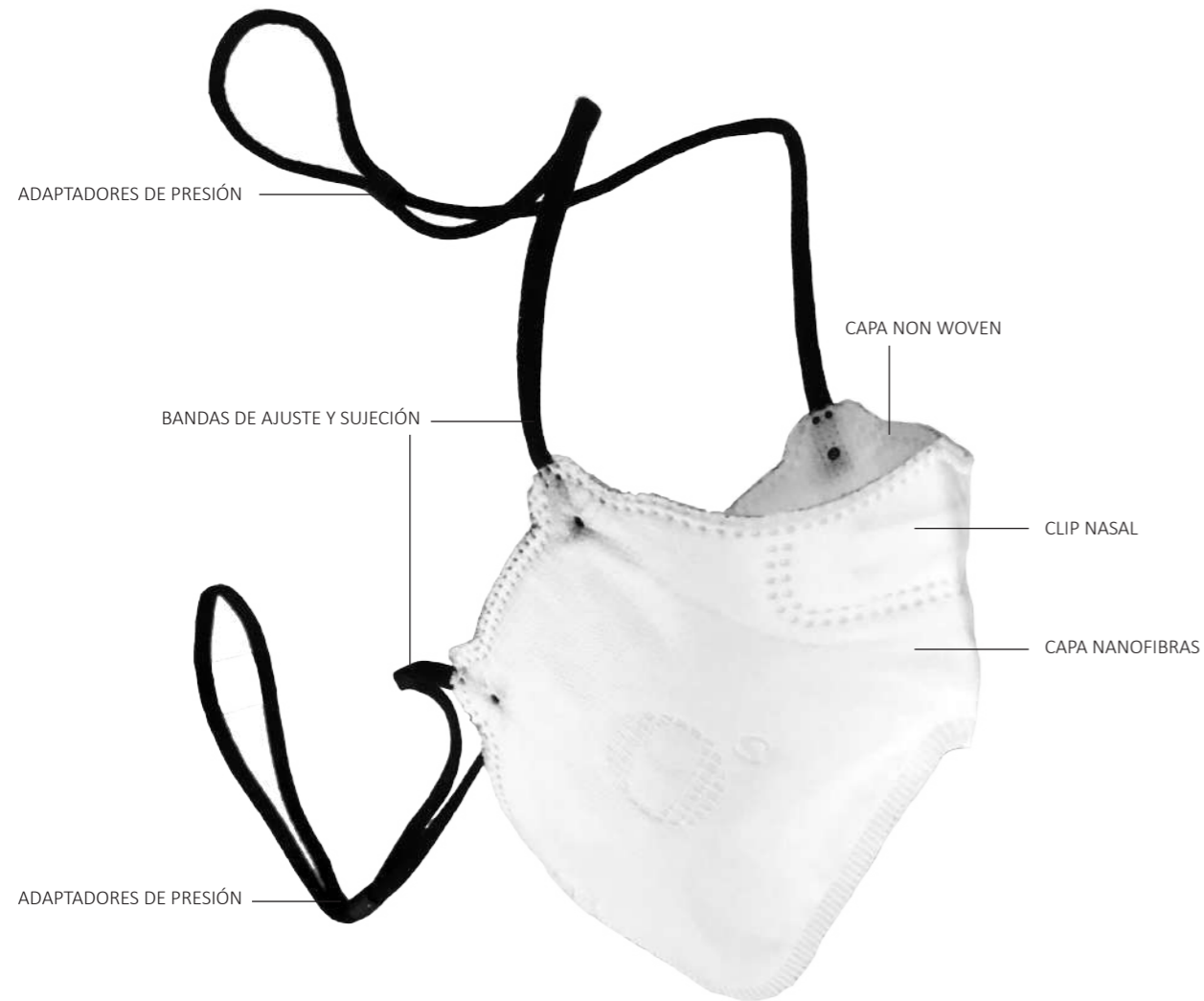


Peso de la mascarilla 5,80gr

## Qué tipo de mascarilla es *Optima Sense*

Tras los ensayos realizados y aprobados por AITEX de acuerdo a la norma EN 149:2001+A1:2009 modificada por RfU PPE-R/02.075 versión 2, la mascarilla Optima Sense tiene unos valores cercanos a la FFP3, por lo que se situaría entre la eficacia de mascarillas autofiltrantes FFP2 y FFP3.


**Evita contagiar y contagiarse.**

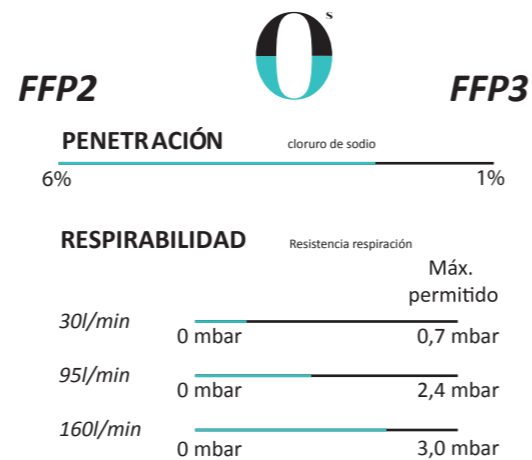

## Características



NORMATIVA	UNE-EN 149 modificada RfU PPE-R/02.075.02
Penetración Máx. a 120 mg de cloruro de sodio.	1,9%
Penetración Media a 120 mg de Cloruro de sodio [3,5 minutos].	1,88%
Respirabilidad. Vmax 30 l/min   95 l/min   160 l/min	0,25   1,29   1,48
Valor medio de contenido de CO2 en el aire inhalado	0,34%
NIVEL DE PROTECCIÓN	MUY ALTO

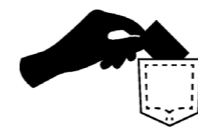

## Almacenamiento y transporte

Las mascarillas *Optima sense* tienen una vida de almacén de 3 años. La fecha de caducidad está marcada en el embalaje. Antes de comenzar a utilizarlas, compruebe que el producto está dentro de su vida útil. El producto debe almacenarse en lugar limpio y seco, en un rango de temperatura de  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+25^{\circ}\text{C}$  a una humedad relativa  $<80\%$ . Utilice el embalaje original para almacenar y transportar el producto.

## Cómo desechar el producto

Los productos contaminados deben desecharse atendiendo a la legislación local para desechos peligrosos. Se desechará en el contenedor de restos para que puedan ser tratados y no supongan un grave problema ambiental.



## Advertencias y limitaciones de uso

### SOLO UN USO. USO PREVISTO SOLO COVID-19

“Esta media máscara filtrante está fabricada solo para protección COVID-19. Según lo solicitado por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para este uso específico, el factor de protección nominal proporcionado por esta media máscara filtrante es el mismo que el factor de protección nominal FFP2 definido en EN 149: 2001 + A1: 2009. Esta media máscara filtrante no es una media máscara filtrante para uso general y no debe usarse para fines distintos a la protección contra COVID-19.”

- > Lavar las manos antes de utilizar este producto.
- > No utilizar si el producto está en malas condiciones.
- > No lavar el producto.

Compruebe siempre que el producto:

- Está en perfecto estado.
- Ajusta correctamente.
- Se utiliza durante toda la exposición.
- Se sustituye cuando es necesario.


- Un entrenamiento, uso y mantenimiento adecuados son esenciales para que el producto ofrezca al usuario protección.
- No seguir todas las instrucciones de uso y/o no utilizar correctamente el producto durante toda la exposición al riesgo puede afectar a la salud del usuario.
- Estos productos no contienen componentes fabricados con látex de caucho natural.
- No se utilizará más de un turno de trabajo.

- Estos productos no protegen frente a gases/vapores.
- No utilice en atmósferas que contengan menos del 19,5% en oxígeno.
- No utilice como protección respiratoria frente a contaminantes atmosféricos / concentraciones desconocidas o inmediatamente peligrosos para la salud o la vida (IDLH).
- No utilice con barba u otro vello facial que dificulte el contacto entre la cara y la mascarilla, impidiendo un buen sellado.
- Abandone inmediatamente el área contaminada si:
  - a) Se hace difícil la respiración.
  - b) Siente mareos o malestar.
- Deseche y reemplace la mascarilla si se daña o aumenta la resistencia a la respiración.
- Nunca altere, modifique o repare este equipo.
- Este producto no es resistente al fuego y no debe utilizarse en áreas de fuego abiertas.

## Instrucciones de uso




**1.** Sostenga la mascarilla con una mano con el clip nasal entre la punta de los dedos y con las bandas de ajuste colgando hacia abajo.

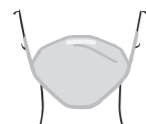

**2.** Coloque la mascarilla por debajo de la barbilla, con el clip nasal hacia arriba.



**3.** Coloque la banda superior en la coronilla y la banda inferior por debajo de las orejas. Las bandas no deben quedar retorcidas.

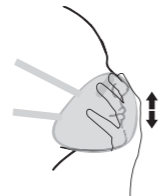

**4.** Acomode la mascarilla con una o dos manos para que quede colocada en su posición ideal.



**5.** Utilizando las dos manos, moldee el clip nasal con la forma de la parte inferior de la nariz, de forma que quede bien ajustado. Si utiliza sólo una mano, puede que no se consiga un ajuste adecuado.



**6.** El correcto sellado de la mascarilla debe comprobarse inhalando con fuerza.

### Nota importante

ANDEFIL no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo contrario, ANDEFIL no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubiera producido por ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.



P.I. Mensaque, C/ Rodeo 1, 41970 Santiponce (Sevilla). Tlf: 954 36 73 30- Fax: 954 36 73 31

[WWW.ANDEFIL.COM](http://WWW.ANDEFIL.COM)

ANDEFIL se reserva todos los derechos de propiedad intelectual, así como denominaciones comerciales, marcas, nombres comerciales, diseños y copyrights. Queda terminantemente prohibida la reproducción del contenido de esta página sin autorización previa por escrito. ANDEFIL se reserva el derecho de modificar en todo momento las características de los modelos que aparecen en este documento.